



My FILLER
NEW LIFE TO THE SKIN





INNOVACIÓN CIENTÍFICA

El ácido hialurónico reticulado se combina con miles de moléculas de agua expandiéndose y creando volumen donde se inyecta suavizando las arrugas, depresiones de la piel y cicatrices. Al mismo tiempo, hidrata las células alrededor del sitio de aplicación dando un estado vibrante y saludable.

My Filler fue creado y desarrollado en uno de los más modernos laboratorios y centros de investigación por un equipo altamente calificado. **My Filler** utiliza un protocolo de producción muy seguro donde los residuos de impurezas están prácticamente ausentes. Todas las etapas de producción se realizan en un ambiente estéril que garantiza un producto final puro.

Los productos **My Filler** se basan en la **Tecnología TRIO** donde un peso molecular específico de HA a diferentes tasas de reticulación de BDDE y diferentes concentraciones de ácido hialurónico se combinan en un entorno de producción especial y procedimientos de fabricación específicos para cada tipo de relleno dérmico.

Esta fórmula compleja se puede utilizar para crear todos los resultados estéticos faciales deseados.

Los resultados de My Filler son asombrosos!!!!

- Larga duración en el lugar de la inyección
- Gran capacidad hidrofílica
- Moldeabilidad
- Estabilidad posterior al procedimiento



SOFT



My Filler Soft se recomienda cuando se necesita una ligera creación de volumen y una poderosa hidratación en el sitio inyectado.

Profundidad de inyección recomendada: la dermis superficial.



Recomendado para: Zonas como la periorbitaria, eliminando la oscuridad debajo de los ojos, o la perioral, eliminando las arrugas de la epidermis queratinizada (líneas de fumador), labios naturales e hidratación.

My Filler Soft también se usa para realzar y mantener una tez vibrante y prevenir la reaparición de las arrugas.

My Filler Soft es muy fluido, por lo que su uso con técnicas de Mesoterapia también es adecuado.



CE 0373

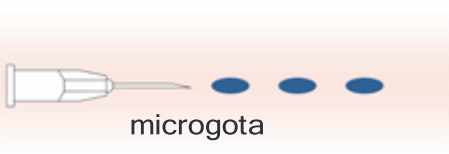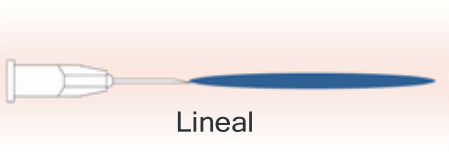

Aguja de inyección sugerida:



Producido usando **Tecnología TRIO**, tiene la menor concentración de HA en el rango **My Filler**, solo 20 mg/ml. Tiene una viscosidad muy baja, por lo que es extremadamente fácil de inyectar con una aguja de 27G o 30G.



Área de inyección sugerida:



Código	Concentración de AH	Tipo HA	agente reticulado	Tasa reticulada	Tamaño de partícula
MYF001	20 mg/ml	monofásico	BDDE	1,5	80

El envase My Filler Soft contiene: 1 jeringa estéril precargada de 1 ml, 2 agujas 27G 1/2", 2 etiquetas de producto, 1 prospecto multilingua, 1 ficha de paciente.

MyFILLER

MEDIUM



My Filler Medium es el producto más popular de la familia My Filler gracias a sus propiedades de aplicación general. Usando Medium, creará un volumen mediano y una hidratación energética en el sitio inyectado.

Profundidad de inyección recomendada: la dermis media.

Recomendado para: Sitios como pliegues nasolabiales, mentolabiales (líneas de marioneta), glabella (líneas del entrecejo) y aumento de labios.



My Filler Medium es muy suave de inyectar gracias a la jeringa ergonómica, al cómodo pistón, al émbolo seguro y a la viscosidad media.


El material se asienta perfectamente en el sitio de inyección deseado y es muy duradero y estable una vez inyectado.

CE 0373




Producido usando **Tecnología Trio**, tiene una concentración de 25mg/ml de HA monofásico. Tiene una viscosidad media apta para inyección con aguja o cánula de 27G. Varias técnicas son adecuadas con el relleno **My Filler Medium** como la lineal, punto o tramado cruzado.


Área de inyección sugerida:

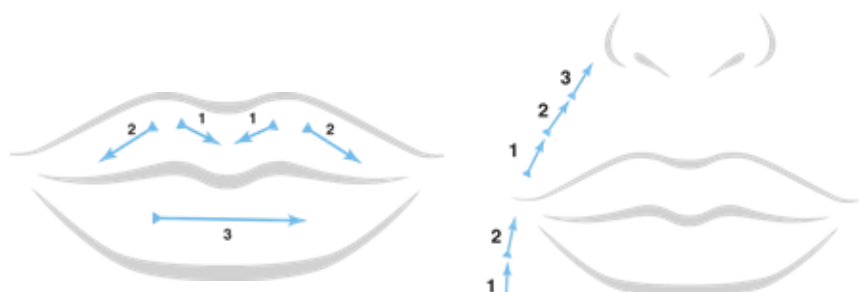

Técnica de inyección sugerida:

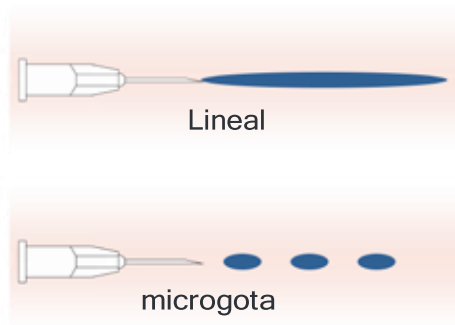

Aguja de inyección sugerida:

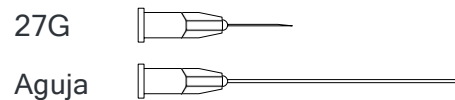

Código	Concentración de AH	Tipo HA	agente reticulado	Tasa reticulada	Tamaño de partícula
MYF002	25 mg/ml	monofásico	BDDE	2,5	100

El envase My Filler Medium contiene: 1 jeringa estéril precargada de 1 ml, 2 agujas 27G 1/2", 2 etiquetas de producto, 1 prospecto multilengua, 1 ficha de paciente.

STRONG



My Filler Strong es una obra maestra... Se recomienda específicamente para la corrección de gran volumen asociada con el contorno facial.

Profundidad de inyección recomendada: la dermis profunda al periostio.

Recomendado para: mejillas, barbilla, nariz, mandíbula y mitad de la cara.

My Miller Strong Tiene una alta viscosidad y grandes propiedades de moldeabilidad. Una vez inyectado en el sitio deseado, el material permanece donde está implantado evitando migraciones inesperadas a otras partes de la cara.

My Filler Strong se puede usar con cánula o con una variedad de calibres de aguja de 27G a 25G.



CE 0373

Técnica de inyección sugerida:

Lineal, Puntual




Ventilador

My Filler Strong es único en su tipo. Producido usando **Tecnología TRIO**, tiene la excepcional concentración de HA de 30 mg/ml. Tiene una viscosidad muy alta pero tiene la capacidad de pasar sin problemas a través de agujas y cánulas de 25G, 26G y 27G.



Aguja de inyección sugerida:

25G - 27G 

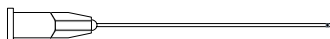Cánula 

Área de inyección sugerida:



Código	Concentración de AH	Tipo HA	agente reticulado	Tasa reticulada	Tamaño de partícula
MYF003	30 mg/ml	monofásico	BDDE	3,5	140

El envase My Filler Strong contiene: 1 jeringa estéril precargada de 1 ml, 2 agujas 27G 1/2", 2 etiquetas de producto, 1 prospecto multilingua, 1 ficha de paciente.



RESULTADOS INMEDIATOS Y DURADEROS

Una nueva tecnología desarrollada por el equipo de **My Med** resuelve un problema recurrente para los pacientes - el deseo de resultados inmediatos.

Es bien sabido que los rellenos estándar tardan en lograr el resultado final. La razón detrás de esto es que el material reticulado de HA necesita tiempo para asentarse y conectarse con las partículas de agua. Este proceso puede tardar de 5 a 7 días dependiendo de varios factores biológicos del paciente. Los beneficios del proceso de entrecruzamiento significan que los resultados serán duraderos.

Los rellenos no reticulados (también conocidos como biorrevitalizadores o potenciadores de la piel) tienen una vida útil muy corta después de la inyección debido a la rápida degradación de la hialuronidasa natural del cuerpo. Su acción es conectar inmediatamente con el agua dando una tez vibrante y luminosa. Desafortunadamente, después de 5 a 7 días, el material desaparece por completo.

El **equipo de My Med** ha creado la **Tecnología de doble enlace**... una formulación especial que aprovecha la tecnología de enlaces cruzados y no cruzados para brindar a los médicos y pacientes el beneficio óptimo de ambos en un producto increíble.

La línea especial de rellenos que utilizan **Tecnología de doble enlace** dará un efecto instantáneo debido a la no reticulación y un resultado duradero de la reticulación asegurando que los pacientes estén satisfechos con sus resultados inmediatos y ahorrando tiempo al médico al evitar la necesidad de retoques.




MyFILLER

GLIPS



My Filler Glips es el primer producto del rango My Filler completamente dedicado y hecho exclusivamente para tratamientos de labios, como volumen y contorno.

My Filler Glips tiene una formulación especial creada teniendo en cuenta una variedad de diferencias: biológicas, estructurales, de color, forma y volumen. Su finalidad es dar una solución inmediata y a largo plazo, cumpliendo los deseos y expectativas del paciente.

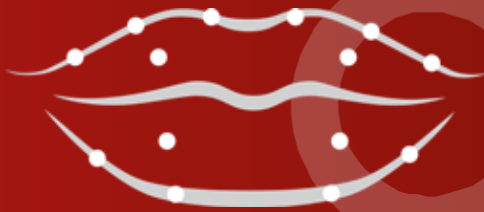


CE 0373


Producido usando la **Tecnología de doble enlace**, tiene una concentración de 20 mg/ml de HA monofásico reticulado y 5 mg/ml de HA monofásico no reticulado. Tiene una viscosidad media apta para inyección con aguja o cánula de 27G. Varias técnicas de inyección son adecuadas con **My Filler Glips** como la técnica lineal o puntual.



Técnica de inyección sugerida:

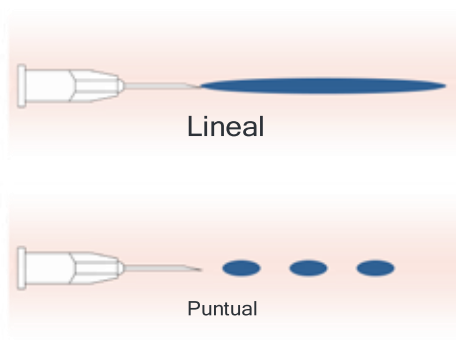

Aguja de inyección sugerida:

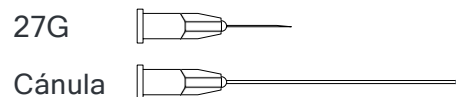

Código	Concentración de AH	Tipo HA	agente reticulado	Tasa reticulada	Tamaño de partícula
MYF105	20 + 5mg/ml	monofásico	BDDE	2	100

El envase My Filler Glips contiene: 1 jeringa estéril precargada de 1 ml, 2 agujas 27G 1/2", 2 etiquetas de producto, 1 prospecto multilengua, 1 ficha de paciente.

MyFILLER

Man Max



My Filler Man Max es una formulación especial creada tomando en consideración las diferencias biológicas y estructurales entre la piel de un hombre y de una mujer.

Además de tener vello facial, existen diferencias estructurales entre la piel del hombre y la piel de la mujer. Grosor de la piel: la piel masculina es aproximadamente un 25% más gruesa. La densidad del colágeno en la piel masculina es mayor. La textura de la piel en los hombres es más dura y áspera.






Producido usando **Tecnología de doble enlace**, My Filler Man Max tiene una concentración de 25 mg/ml de HA monofásico reticulado y 5 mg/ml de HA monofásico no reticulado. Tiene una alta viscosidad apta para inyección con aguja o cánula de 25G, 26G y 27G. Varias técnicas de inyección son adecuadas con **My Filler Man Max** tales como técnicas lineales, puntuales, de abanico o de tramado cruzado.

Técnica de inyección sugerida:

Lineal, Puntual



Aguja sugerida:

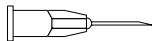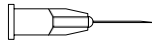- 26G 
- 27G 
- Cánula 

Código	Concentración de AH	Tipo HA	agente reticulado	Tasa reticulada	Tamaño de partícula
MYF004	25 + 5mg/ml	monofásico	BDDE	3	120

El envase de My Filler Man Max contiene: 1 jeringa estéril precargada de 1 ml, 2 agujas 27G 1/2", 2 etiquetas de producto, 1 prospecto multilingua, 1 ficha de paciente.